

東ソーコントロール (TPOAb)

** 本品は、Eテスト「TOSOH」® II (TPOAb) 及びAIA-バックCL® TPOAbに専用のコントロールで、精度管理に用います。

【本質】

1. 本品はTPOAb及び蛋白質を含む液体で、次の2種類のTPOAbコントロールからなっています。
東ソーコントロール (TPOAb) レベル1
東ソーコントロール (TPOAb) レベル2
- ** 2. TPOAbコントロールの表示濃度は社内標準品を基準として、Eテスト「TOSOH」II (TPOAb) 及びAIA-バックCL TPOAbを用いてそれぞれ決めたものです。その値はIU/mlを単位として、びんのラベルに記載されています。本品の表示濃度範囲は測定結果の許容範囲を意味するものではありません。測定結果の管理幅は施設ごとに設定してください。

【使用方法】

1. 本品は液体ですので、開封後そのまま使用してください。
- ** 2. 本品は、装置の取扱説明書及び試薬の電子添文に従って測定してください。

【使用上の注意】

1. 本品は上記の用途以外に使用しないでください。
2. 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。
3. 冷蔵庫から出して使用する際には15～25℃に戻してから使用してください。
4. 開封後の本品は密封して2～8℃保存した場合7日間安定ですが、保存条件によっては安定性が変化する場合がありますので、できるだけ早く使用してください。
5. 試験器具などの汚れは判定を誤らせる場合がありますので、清浄なものを使用してください。
6. 本品には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれていますので、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の指導を受けてください。また、アジ化ナトリウムは鉛管・銅管と反応して爆発性のある金属アジドを生成することがありますので、測定終了後の液を廃棄する際には大量の水とともに薄めて廃棄してください。
7. 本品はHIBs抗原、HIV抗体及びHCV抗体が陰性であることが確認されていますが、被検体の場合と同様に取扱いには注意してください。本品や検体の付着したビベットチップ、手袋などの器具、及び測定終了後の試薬カップはオートクレーブ (例えば121℃、20分以上) などで滅菌後廃棄してください。
8. 本品は開封後、希釈しないで使用してください。

【貯蔵方法・有効期間】

1. 貯蔵方法 2～8℃保存
2. 有効期間 12ヶ月
※使用期限は、箱、びんのラベルに記載されています。

【包装単位】

品番	品名	包装
0015490	東ソーコントロール (TPOAb)	レベル1、2： 各4.0 mL入り×2本

“Eテスト「TOSOH」”及び“AIA-バックCL”は東ソー株式会社の登録商標です。

【問い合わせ先】

東ソー株式会社 バイオサイエンス事業部
カスタマーサポートセンター
〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川 2743-1
フリーダイヤル® 0120-17-1200
TEL. (0467) 76-5384
FAX. (0467) 79-2550

** 【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売元



東ソー株式会社

東京都中央区八重洲 2-2-1

製造元



東ソー・エイアイエイ株式会社

富山県富山市岩瀬古志町 2 番地



TOSOH CORPORATION
2-2-1 Yaesu, Chuo-ku,
Tokyo 104-0028 Japan
Phone: +81 3 6636 3734
Fax : +81 3 6636 3627

EC REP

TOSOH EUROPE N.V.
Transportstraat 4, 3980
Tessenderlo, Belgium
Phone: +32 13 66 88 30
Fax : +32 13 66 47 49

UK RP

TOSOH BIOSCIENCE LIMITED
Lyttchett House, 13 Freeland Park,
Wareham Road, Poole, Dorset, BH16 6FA UK
Phone: +44 1527 592901
Fax : +44 1527 471680

Supplied by

TOSOH BIOSCIENCE, INC.
3600 Gantz Road,
Grove City, OH 43123 USA
Phone: +1 650 615 4970
Fax : +1 650 615 0415



In vitro diagnostic
medical device



Consult instructions for use



Batch code / Lot number



Temperature limitation



Use-by date



Catalogue number
/ Part number



Manufacturer



Authorised representative
in the European Community



Net volume
(after reconstitution
for lyophilized material)



UK Responsible person



United Kingdom
Conformity Assessed



Supplied by



A carrier containing unique
device identifier information

東ソーコントロール(TPOAb) 参考値表

ロット番号:FX44740

使用期限:2026-9-30

(注)表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。

測定方法

1) Eテスト「TOSOH」® II

測定項目	単位	レベル1 参考値	レベル2 参考値
TPOAb	IU/mL	1.6~2.4	7.6~11

2) AIAーパックCL®

測定項目	単位	レベル1 参考値	レベル2 参考値
TPOAb	IU/mL	2.0~3.0	10~15